



Scheda Prodotto

i 172027 | CX.ACTIVE AZ. LENITIVA 5P.12PZ

GTIN

8002945751117

Descrizione

Cerox active cerotto Azione Lenitiva 5 pz

Default Language

it

Target Markets

IT

Codice Articolo

172027

Barcode EAN13



i Descrizione Prodotto

Brand

Cerox

Caratteristiche

Hydrogel technology

Efficace in Caso di lombalgie, torcicollo, tensioni muscolari, dolori reumatici
Con Artiglio del Diavolo, Arnica, VBE e Wintergreen Oil

Allevia la sensazione dolorosa e contribuisce al rilassamento della parte interessata

5 Cerotti

1 Busta richiudibile

10x14cm

Effetto caldo

Prodotto in Italia

Sottomarca

active

Denominazione di vendita

i Marketing

Logo di terzi

Marchio CE - Conformità europea

Bandiera italiana

Marketing prodotto

Cerox Active Cerotto Azione Lenitiva è un cerotto ad effetto caldo realizzato con la tecnologia Hydrogel. Il cerotto caldo dona, già dal momento dell'applicazione, un effetto di sollievo sull'area trattata; l'azione sinergica dei componenti è stata appositamente studiata per garantire un confortevole effetto caldo sull'area dolente. La soffice e confortevole struttura del cerotto protegge l'area interessata e contribuisce a mantenerla idratata con l'elevato contenuto di acqua purificata presente nell'hydrogel. Inoltre, la tecnologia hydrogel consente una rimozione delicata ed indolore del cerotto. Cerox Active Cerotto Azione Lenitiva contiene: - VBE (Vanillyl Butyl Ether), che induce una piacevole sensazione di calore sulla pelle, donando sollievo dalle tensioni muscolari e articolari; - Wintergreen oil, sostanza estratta dalla Gaultheria Procumbens, nota per le sue proprietà lenitive; - Artiglio del diavolo, dalle proprietà lenitive, dona sollievo alle aree dolenti; - Arnica, dalle proprietà lenitive, dona sollievo dalle tensioni muscolari. Indicazioni Cerox Active Cerotto Azione Lenitiva allevia la sensazione dolorosa nelle aree del corpo affette da dolori reumatici e muscolari, lombalgie o torcicollo. Contribuisce al rilassamento della parte contratta e protegge l'area dolente interessata da traumi e contusioni, anche a seguito di attività sportive.

Marketing Brand

Cerox pronto rimedio

i Conservazione e uso

Tipo di conservazione

Ambiente

Preparazione e uso

i Confezione

Dimensioni imballaggio

Dimensioni

Istruzioni per l'uso Estrarre Cerrox Active Cerotto Azione Lenitiva dalla confezione e rimuovere la pellicola protettiva. Applicare il cerotto sull'area dolente, eventualmente ritagliandolo della forma e dimensione adeguata. Rimuovere il cerotto sollevando delicatamente un lembo e tirando. Frequenza d'uso Utilizzare Cerrox Active Cerotto Azione Lenitiva al bisogno e mantenere il cerotto sull'area da trattare fino al termine della sensazione benefica. La durata dell'effetto di Cerrox Active Cerotto Azione Lenitiva è soggettiva e comunque si esaurisce nell'arco di alcune ore.

Altezza scaffale (mm) : 229
Larghezza scaffale (mm) : 150
Profondità scaffale (mm) : 7

CLP Regulation

Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO: Non utilizzare sull'area del corpo da trattare più di un cerotto per ogni applicazione. Non usare CEROX Active Cerotto Azione Lenitiva se il confezionamento risulta danneggiato. Non usare su cute danneggiata, indipendentemente dal tipo di lesione. Non deve essere indossato durante il bagno o la doccia. Non applicare sugli occhi e sulle zone intorno e/o sulle membrane mucose. Non impiegare il prodotto contemporaneamente ad altri trattamenti topici eventualmente applicati sulla zona da trattare. In caso di qualsiasi dubbio sull'utilizzo di CEROX Active Cerotto Azione Lenitiva consulti il suo medico. Per uso esterno. Non ingerire. I cerotti contenuti nella confezione di CEROX Active Cerotto Azione Lenitiva sono monouso e non possono essere riutilizzati. Una volta utilizzato, eliminare il prodotto seguendo le normali regole di smaltimento differenziato dei rifiuti urbani. **NON USARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.** Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dai raggi solari e lontano da fonti di calore. **TENERE LONTANO DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.** **CONTROINDICAZIONI:** CEROX Active Cerotto Azione Lenitiva non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota ad uno o più dei componenti. Il cerotto contiene derivati dell'acido salicilico. **GRAVIDANZA** Non c'è nessun legame tra l'utilizzo di CEROX Active Cerotto Azione Lenitiva e la comparsa di eventi avversi in gravidanza o possibili difetti al nascituro. Tuttavia nessuno studio ha specificatamente studiato questo aspetto, pertanto l'uso di CEROX Active Cerotto Azione Lenitiva non è raccomandato in gravidanza a meno che non sia strettamente necessario. In questo caso, può rivolgersi al suo medico che la può consigliare sulla decisione da prendere. **INTERAZIONI:** Ad oggi non sono note interazioni tra i componenti di CEROX Active Cerotto Azione Lenitiva e altri medicinali.

Lingue sull'imballo

Italiano

Attenzione

ATTENZIONE - NON E' UNA SCHEDA DI SICUREZZA – LE DICITURE INDICATE NELLA PRESENTE SCHEDA FANNO RIFERIMENTO AL CODICE EAN-13 – LE DICITURE POSSONO VARIARE A PARITA' DI EAN-13 IN BASE AD AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO CHE NON RICHIEDONO CAMBIAMENTO DI EAN-13 – IN CASO DI DUBBI SULLE DICITURE DEL PRODOTTO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO