

Scheda Prodotto

i 179006 | MIODENT 56
COMPRESSE 12PZ

GTIN

8002945755924

Descrizione

Miodent Care for you Pulizia Profonda Compresse Effervescenti per Protesi Dentali 56 pz

Default Language

it

Target Markets

IT

Codice Articolo

179006

Barcode EAN13



i Descrizione Prodotto

Brand

Miodent

Caratteristiche

56 Compresse
Igiene in 3 minuti
Rimozione dei residui alimentari
Prodotto in Italia
Partner ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Dispositivo medico

Sottomarca

Care for you

Denominazione di vendita

Miodent Compresse

i Marketing

Logo di terzi

Marchio CE - Conformità europea

Bandiera italiana

Marketing prodotto

Marketing Brand

i Conservazione e uso

Tipo di conservazione

Ambiente

Preparazione e uso

Modalità di utilizzo Il dispositivo medico è pronto all'uso e va utilizzato per la pulizia quotidiana di protesi dentali e ponti mobili. Le modalità di utilizzo sono riportate di seguito: 1 Riempire un contenitore idoneo di acqua tiepida in quantità sufficiente da ricoprire la protesi o il ponte mobile. Introdurre una compressa Miodent in acqua. 2 Immergere la protesi o il ponte mobile nella soluzione e lasciarlo per almeno 3 minuti; per una pulizia più profonda si consiglia di lasciarlo per almeno 10 minuti. La protesi o il ponte mobile può essere lasciato immerso nella soluzione per tutta la notte. 3 Estrarre la protesi o il ponte mobile e sciacquarlo accuratamente con acqua corrente prima di indossarlo. Indicazioni d'uso Il dispositivo medico è indicato per la pulizia quotidiana di protesi dentali e ponti mobili.

i Confezione

Dimensioni imballaggio

Dimensioni

Altezza scaffale (mm) : 106
Larghezza scaffale (mm) : 101
Profondità scaffale (mm) : 73

CLP Regulation

Avertenze di sicurezza

Miodent Compresse ATTENZIONE Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. In caso di ingestione accompagnata da malessere contattare un Centro Antiveleni o un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. CONTROINDICAZIONI: Il dispositivo medico non è indicato per i soggetti con nota ipersensibilità ai componenti presenti nella formulazione. AVVERTENZE: Prima dell'uso leggere attentamente le informazioni fornite dal fabbricante. Interrompere il trattamento in caso di insorgenza di qualsiasi effetto indesiderato. Non ingerire. Non usare direttamente in bocca. Evitare il contatto con gli occhi; risciacquare accuratamente in caso di contatto oculare accidentale. Se l'irritazione oculare persiste, consultare un medico. Conservare in luogo asciutto, lontano dal calore, a temperatura inferiore a 25°C. Non utilizzare il prodotto se la confezione risulta aperta o danneggiata. Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e conservato in modo corretto. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Per una pulizia ottimale e per ridurre il rischio di contaminazione crociata si raccomanda di utilizzare una compressa effervescente per ciascun dispositivo da pulire. Se la protesi o il ponte mobile sono costituiti da materiali innovativi si consiglia di consultare il proprio medico per assicurare la compatibilità con i componenti della formulazione. È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'Autorità Competente dello stato membro in cui l'incidente si è verificato.

Lingue sull'imballo

Italiano

Attenzione

ATTENZIONE - NON E' UNA SCHEDA DI SICUREZZA – LE DICITURE INDICATE NELLA PRESENTE SCHEDA FANNO RIFERIMENTO AL CODICE EAN-13 – LE DICITURE POSSONO VARIARE A PARITA' DI EAN-13 IN BASE AD AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO CHE NON RICHIEDONO CAMBIAMENTO DI EAN-13 – IN CASO DI DUBBI SULLE DICITURE DEL PRODOTTO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO