



Scheda Prodotto

i 183001 | FPR.TEST
GRAVIDANZA 2T 6PZ

GTIN

8002945770903

Descrizione

First Praedict Care for you Test di Gravidanza Precoce 2 pz

Default Language

it

Target Markets

IT

Codice Articolo

183001

Barcode EAN13



i Descrizione Prodotto

Brand

First Praedict

Caratteristiche

Accurato, veloce, semplice

2 Test

Self-test per la rilevazione precoce di hCG nelle urine (10 mIU/ml)

Eseguibile già prima dell'inizio previsto del ciclo*

In caso di gravidanza risultato veloce anche in 1 minuto**

Accuratezza superiore al 99%

*Il test può essere eseguito già tre giorni prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni

**In caso di gravidanza il risultato «Incinta» può apparire anche in un minuto

Sottomarca

Care for you

Denominazione di vendita

Test di gravidanza precoce

i Marketing

Logo di terzi

Marchio CE - Conformità europea

FSC

Marketing prodotto

Marketing Brand

i Conservazione e uso

Tipo di conservazione

Ambiente

Preparazione e uso

Guida rapida Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di effettuare il test. 1) Aprire la busta protettiva e prendere il dispositivo per il test. 2) Rimuovere il cappuccio protettivo esponendo la punta assorbente. 3) Mettere la punta assorbente direttamente sotto il flusso di urina per almeno 10 secondi oppure raccogliere le urine in un contenitore pulito e asciutto senza residui ed immergere completamente la punta assorbente per 10 secondi. 4) Leggere il risultato dopo 5 minuti esatti. Risultato positivo - Incinta Risultato negativo - Non Incinta Segui le istruzioni complete all'interno della scatola. Per uso diagnostico in vitro. Solo per uso esterno. Se aperto o manomesso non usare. Rilevazione precoce* *Il test può essere eseguito già tre giorni prima del giorno in cui sono previste le

i Confezione

Dimensioni imballaggio

Dimensioni

Altezza scaffale (mm) : 212

Larghezza scaffale (mm) : 61

Profondità scaffale (mm) : 18

mestruazioni. Risultato anche in 1 minuto** **In caso di gravidanza il risultato «Incinta» può apparire anche in un minuto. Per la conferma «Non incinta» attendi 5 minuti.

CLP Regulation

Avertenze di sicurezza

ATTENZIONE: Tenere lontano dalla portata dei bambini. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Lingue sull'imballo

ItalianoAltro

Attenzione

ATTENZIONE - NON E' UNA SCHEDA DI SICUREZZA – LE DICITURE INDICATE NELLA PRESENTE SCHEDA FANNO RIFERIMENTO AL CODICE EAN-13 – LE DICITURE POSSONO VARIARE A PARITA' DI EAN-13 IN BASE AD AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO CHE NON RICHIEDONO CAMBIAMENTO DI EAN-13 – IN CASO DI DUBBI SULLE DICITURE DEL PRODOTTO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO